


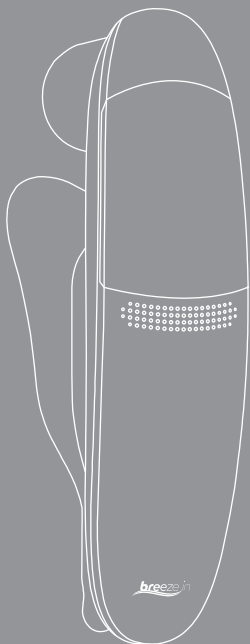

사용설명서

브리즈인 아이레이



※ 주의

본 제품은 전자제품으로 방수기능을 지원하지 않습니다. 반드시, 청소 및 보관법을 숙지하여 주시기 바랍니다.



Google Play

컨트롤러 앱과 A/S 신청은 정품인증 제품만 가능합니다.



App Store

구매 후 반드시 브리즈인 앱을 통해 정품인증을 받으세요.

자세한 사항은▼

https://breezein.co.kr/shopinfo/breezein_app.html


안전을 위한 주의사항

※ 사용 시 주의사항



- * 반드시 사용설명서를 읽은 후 사용하기 바랍니다.
- * 안전을 위하여 충전 시에는 동작하지 않습니다.
- * 습기가 많은 곳(목욕탕 등)에서 사용하지 마세요.
- * 사용자가 임의로 제품을 분해 하지 마세요.
- * 제품을 청소할 때는 반드시 청소법을 숙지하여 주세요.
- * 소프트가이드는 신체와 최대한 밀착되게 사용하세요.
- * 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 가하지 마세요.
- * A/S를 위하여 반드시 정품인증을 해주세요.

※ 보관 시 주의사항


- * 습한 곳이나 염분이 많은 곳에 보관하지 마세요.
- * 직사광선에 직접 장시간 노출되는 곳에 보관하지 마세요.
- * 습식 허브 케어 기능을 사용한 후에는 반드시 아래의 그림과 같이 후면이 위로 가게 보관하세요.

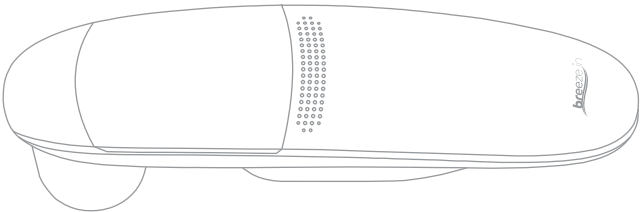

주요부 명칭

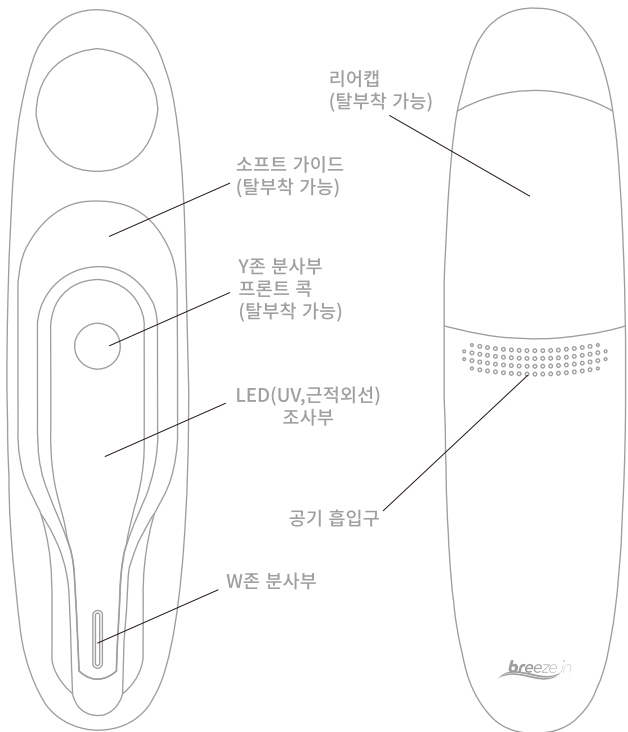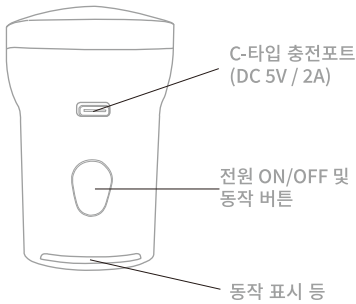

제품 구성품

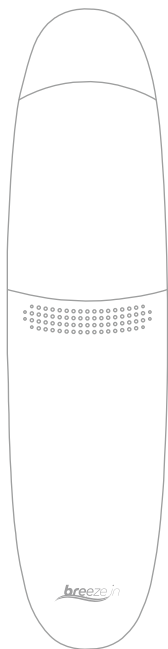


본체



소프트 가이드

하이 타입 1개
로우 타입 1개

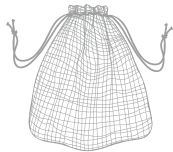

보관용
파우치



사용
설명서

※ NOTICE

본 제품은 일반 스마트폰용 C-TYPE 충전기 (DC 5V, 2A) 로 충전하며, 제로웨이트를 실행을 위하여 충전기는 별도 제공하지 않습니다.


제품 규격



제품명	브리즈인 아이레이
모델명	BR1-1922-3IN1
정격전압 / 동작 최고주파수	DC 5V / 2,480MHz
최대 사용 전력(W)	Max 7.4W
사용 용도	와육기
제품 크기 (길이 X 폭 X 높이)	27cm X 6.8cm X 9.7cm
제품 중량	약 400g (소프트 가이드 제외)
KC 인증번호	R-R-m21-BR1-1922-3IN1
Made In Korea	


사용준비

1-1. 소프트가이드 체결하기

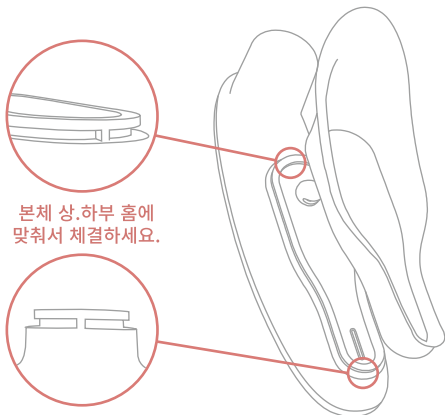

본체 상.하부 홈에
맞춰서 체결하세요.

누워서 사용 시
(습식 허브케어를 제외하고
옆으로 누워서 사용 가능)

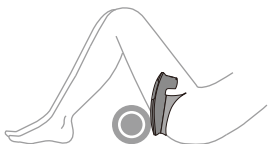

TIP : 밀착 후 자세유지가 힘든 분은
폼롤러 등을 이용하면 좀 더 편하게
밀착이 가능합니다.

서서 사용 시
(드라이기능 사용시)



- *소프트가이드는 외음부에 최대한 밀착되게 사용해 주세요.
- * 본 제품에서 제공하는 소프트가이드는 한국여성의 인체공학을 바탕으로 표준화된 2가지 타입의 소프트가이드를 제공합니다.
- * 제공된 2가지 타입 중 사용 시 편안한 타입을 사용하세요.
- * 소프트가이드는 소모품으로 장기간 사용시 변형될 수 있습니다.

1-2. 전원 버튼 사용법

ON/OFF

전원버튼을 길게 누릅니다.

기능선택

동작 표시등이 보라색 또는 청색 깜빡임상태에서 전원버튼을 짧게 누릅니다.



짧게

1번 누름 : UV 드라이 기능
연속 2번 누름 : 건식 근적외선케어 기능
연속 3번 누름 : 습식 허브케어 기능

1-3. 동작표시등 색상의 의미



보라색

(애플리케이션 비연동 표시)

깜빡임 : 동작 대기 상태표시(전원ON)
계속 켜짐 : 동작 중 상태표시



청색

(애플리케이션 연동 표시)

깜빡임 : 동작대기 상태표시(전원ON)
계속 켜짐 : 동작 중 상태표시



적색

(배터리 관련 표시)

깜빡임 : 배터리 15%이하
(충전필요 표시,동장불가)

계속 켜짐 : 충전 중 상태표시
(완충 시 청색으로 변경)


사용방법

1-1. UV드라이 기능

사용자 안전을 위하여 1회 동작 시 3분 후 자동정지 됩니다.


①

전원버튼을 길게 누르면
전원이 켜지고 대기상태가
됩니다.

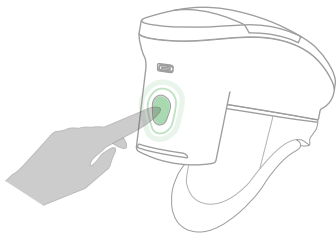

②

서서 또는 누운 상태에서 제품을
다리 사이에 끼우고 외음부에 최대한
밀착시킵니다.

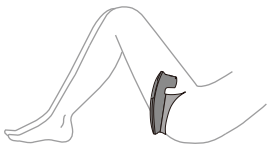


TIP : 밀착 후 자세유지가 힘들신 분은
폼롤러 등을 이용하면 좀 더 편하게
밀착이 가능합니다.

③

대기 상태에서 전원버튼을
짧게 1번 누르면 UV드라이어
기능이 동작됩니다.

(3분 동작 후 대기상태로 자동전환 됩니다.)

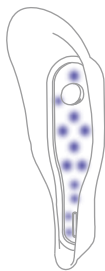

④

동작이 완료되어 대기상태이거나
또는 동작 중 전원버튼을 길게
누르면 기기가 전원이
꺼집니다.



* 온도 및 풍량 조절은 사용자 안전을 위하여
기기에서 제어할 수 없습니다. 스마트폰
어플리케이션을 이용하세요.

1-2. 건식 근적외선케어 기능


사용자 안전을 위하여 1회 동작 시 10분 후 자동정지 됩니다.

- ① 전원버튼을 길게 누르면 전원이 켜지고 대기상태가 됩니다.



- ② 누운 상태에서 제품을 다리 사이에 끼고 외음부에 최대한 밀착시킵니다.

TIP : 밀착 후 자세유지가 힘들으신 분은 폼롤러 등을 이용하면 좀 더 편하게 밀착이 가능합니다.

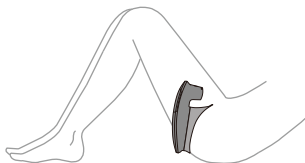

- ③ 대기상태에서 전원버튼을 짧게 2번 누르면 건식 근적외선 케어 기능이 동작됩니다.

(10분 동작 후 대기상태로 자동전환 됩니다.)



- ④ 동작이 완료되어 대기상태이거나 또는 동작 중 전원버튼을 길게 누르면 기기가 전원이 꺼집니다.




* 온도 및 풍량 조절은 사용자 안전을 위하여 기기에서 제어할 수 없습니다. 스마트폰 어플리케이션을 이용하세요.

1-3. 습식 허브케어 기능

사용자 안전을 위하여 1회 동작 시 15분 후 자동정지 됩니다.


온풍 2분 + 훈증 4.5분 + 온풍 2분 + 훈증 4.5분 + 온풍 2분 = 15분
자동 프로그램 설정(변경불가)

- ①
본체 후면의 리어캡을
열어줍니다.

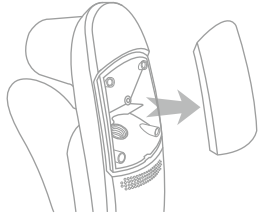


- ②
기기를 거꾸로 들고
솔루션 주입구에
브리즈인 전용 솔루션(별매품)
을 돌려서 연결합니다.


* 주의 *
브리즈인 아이레이 전용 솔루션을
사용하지 않으면 고장이 발생합니다.
(보증기간과 관계없는 유상수리 대상)

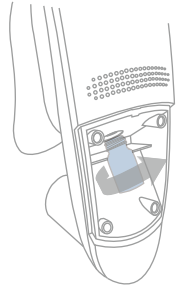

- ③
본체 후면의 리어캡을
다시 덮습니다.

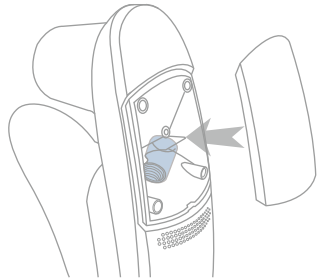


- ④
전원버튼을 길게 누르면
전원이 켜지고 대기상태가
됩니다.

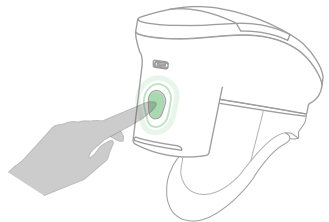

* 온도 및 풍량 조절은 사용자 안전을 위하여
기기에서 제어할 수 없습니다. 스마트폰
어플리케이션을 이용하세요.

⑤ 누운 상태에서 제품을 다리 사이에 끼고 외음부에 최대한 밀착시킵니다.


TIP : 밀착 후 자세유지가 힘든 분은 폼롤러 등을 이용하면 좀 더 편하게 밀착이 가능합니다.

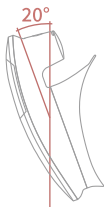

* 주의 *
 습식 허브케어 이용시 기기가 20°이상 뒤로 기울어 지지 않게 주의해주세요. 혼중이 제대로 나오지 않거나, 간혹 솔루션이 기기 내부로 흘러들어가 고장의 원인이 될 수도 있습니다.


⑥ 대기상태에서 전원버튼을 짧게 3번 누르면 습식 허브케어 기능이 동작됩니다.
 (15분 동작 후 대기상태로 자동전환됩니다.)

* 주의 *
 전용솔루션은 사용시 기온, 습도 등 사용환경에 따라 프로그램 15분 완료 후에도 잔여량이 남아 있을 수 있습니다. 또한, 개인의 사정에 의해 동작을 멈추고 잔여량이 남아 있는 경우에도 기기를 거꾸로 들고 전용솔루션 병을 폐기하고 보관하시기 바랍니다.
 (잔여 솔루션은 계속 사용이 불가합니다.)

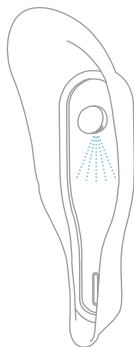


⑦ 동작이 완료되어 대기상태 이거나 또는 동작 중 전원버튼을 길게 누르면 기기 전원이 꺼집니다.

* 주의 *
 동작 중 전원을 꺾을 경우, 남아있는 전용솔루션을 제거하세요. 미제거 시 고장의 원인이 됩니다.
 (보증기간과 관계없는 유상수리 대상)

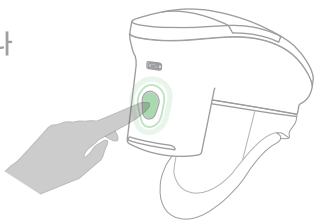

⑧ 소프트가이드와 브리즈인 솔루션 빈 병을 제거한 후 전면부가 아래로 향하도록 5분 정도 둡니다.

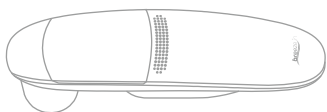


* 온도 및 풍량 조절은 사용자 안전을 위하여 기기에서 제어할 수 없습니다. 스마트폰 어플리케이션을 이용하세요.

청소방법




1. 전원을 꺼주세요.

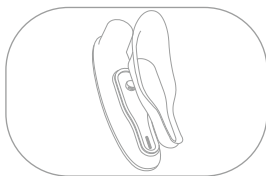


2. 소프트 가이드를 제거하세요.




3. 콕을 제거하세요.

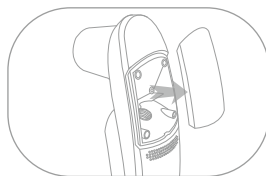

4. 리어 캡을 제거하세요.


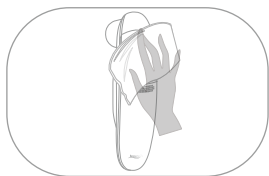


5. 본체 기기의 오염부를 닦아주세요.

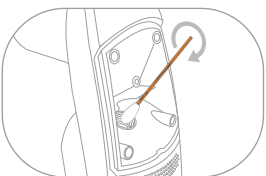

6. 습식 허브케어 기능을 사용한 후, 솔루션 병을 제거해 주시고 상기의 이미지 부위를 알코올을 묻힌 면봉으로 닦아주세요.

APP 설치 및 정품인증

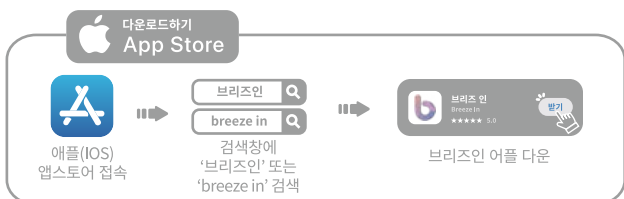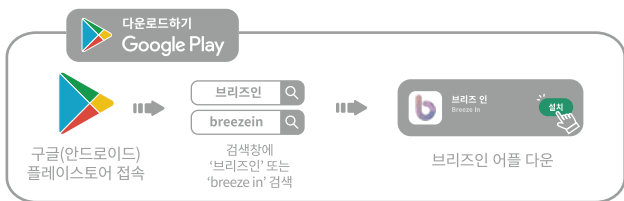

* 정품인증은 APP 설치, 실행 후 지시에 따라 진행하세요.

소비자보호 규정

「소비자기본법」에 따른 소비자분쟁 해결기준

무상서비스

소비자 피해유형	보증 기간 이내 보상	보증 기간 이후 보상
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 시	제품 교환	해당 없음
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 시	제품 교환	해당 없음
수리 가능 동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리	유상 수리
수리 가능 동일 하자로 4회까지 고장 발생 시	제품 교환	유상 수리
수리 불가 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유 기간 이내)	제품 교환	정액 감가 상각 후 교환
수리 불가 수리용 부품은 없어 수리 불가능 시 (부품 보유 기간 이내)	제품 교환	정액 감가 상각 후 교환

유상서비스

소비자 피해유형

고장이 아닌 경우	소비자의 사용설명서 미숙지로 인해 발생하는 단순점검의 경우 비용이 청구 됩니다.
소비자 과실 및 부주의	<ul style="list-style-type: none">· 소비자의 취급부주의 또는 임의 수리, 개조에 의한 고장 발생 시· 제품 규격에 맞지않는 충전기 사용에 의한 고장이 발생하는 경우· 떨어뜨림 등에 의한 손상, 고장 발생의 경우· 제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인해 손상, 고장이 발생 하는 경우· 결로 및 습기가 많은 곳에 보관하여 고장이 발생하는 경우· 전용 솔루션 이외의 솔루션을 사용하여 고장이 발생하는 경우
그 밖의 경우	<ul style="list-style-type: none">· 화재, 천재지변 등에 의한 고장 및 손상· 소모성 부품이 수명이 다 한 경우 (소프트 가이드, 전용솔루션 등)

A/S 접수 안내

A/S 접수

https://www.breezein.co.kr/shopinfo/comm_as.html

A/S 접수처

1522-6687

브리즈인

경기도 남양주시 순화궁로 249,
별내 파라곤스퀘어 M동
2103호, 2104호



A/S 접수

* A/S 접수는 정품인증
제품만 가능합니다.